

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předpříprava pro instalaci mikroskopu CJ-optik Flexion Stropní závěs

- elektrická energie 230 V, vodič CYKY 3J x 2,5 přes samostatný proudový chránič 16 A, $\varphi = 0,03$ A, typ A nebo B (typ AC je zakázaný) volný kabel cca 2m na pozici umístění příruby závěsu, příkon max. 575 W
- ochranné pospojení ZŽ CY 6 mm² volný konec cca 2m
- HDMI kabel s rezervou od stropu 1,8 m pro protažení závěsnou tyčí
- Hmotnost mikroskopu 43 kg

Rozměry mikroskopu bokorys:

Při objednávce je nutno dodat výšku stropu od podlahy!

Umístění mikroskopu vzhledem k stomatologické soupravě:

Varianta A

Viz příloha

Uchycení mikroskopu do stropu:

Stropní konstrukce musí mít následující únosnost:

Kolmá síla na strop : minimálně 1200 N

Kroutící moment : kolmo na strop minimálně 800 Nm

Efektivní zátěž na každou ze 4 kotev závěsu: 2250 N